

Návod k použití

pro skládací zdravotnická nosítka

I. Technické parametry

- Velikost výrobku (d x š x v): 206 x 52 x 13 cm
- Velikost složeného výrobku (d x š x v): 103 x 18 x 9 cm
- Velikost balení 2 ks (d x š x v): 112 x 20 x 19 cm
- Hmotnost netto (1 ks): 5, 5 kg
- Nosnost: ≤ 159 kg



II. Použití

Skládací nosítka jsou vyrobena z vysoce pevné hliníkové slitiny a nepromokavých materiálů. Nosítka mohou být složena, čímž umožňují snadnou přepravu a skladování. Oranžová tkanina je ohnivzdorná, voděodolná, odolná proti plísni, nepraská a snadno se čistí.

III. Určení

Nosítka jsou vhodná pro ambulanci, polní nemocnice, k přepravě raněných a jako dočasné lůžko pro ošetření pacientů. Mohou být taktéž použita i v jiných běžných provozech.

IV. Upozornění

- Při nesení pacientů nosítky se ujistěte, že bezpečnostní pásy jsou dotaženy.
- Dbejte na to, aby nedošlo k roztržení nosného povrchu nosítek.

V. Údržba

- Udržujte v čistotě (vč. sterilizace).
- Kontrolujte, zda nejsou některé části uvolněné.

VI. Skladování a přeprava

- Výrobek je nutno skladovat v suchých prostorách.
- Pro přepravu výrobku nejsou kladeny žádné zvláštní podmínky.

Dovozce:

Elektropomůcky Pardubice s.r.o.
Raisova 232
530 02 Pardubice
Česká republika

Telefon: +420 466 330 782
Web: www.elpom.cz
E-mail: elpom@elpom.cz

 **ELEKTROPOMŮCKY**
PARDUBICE s.r.o.
RAISOVA 232, 530 02 PARDUBICE
IČO 647 97 168